



配置脊柱标记默认值


1. 如果设置其他用户的首选项，模拟该用户或角色。
2. 在“影像”区中显示轴位影像。
3. 按 F12 或者，从“影像”区顶部工具栏中，单击自定义。
4. 在“自定义”对话框中，切换到用户描述纪录标签。
5. 在“用户描述纪录”标签中，切换到脊柱批注标签。
6. 要选择标签首选项，从脊柱类型列表中选择脊柱区域。
7. 选择标记首选项。
8. 对于要标记的每个脊柱类型，重复步骤 5 到 7。
9. 从开始标记列表中，选择要开始标注的脊柱的水平。
10. 确定要应用标注的位置。
要将标记应用到全部关联的序列，选择应用 3D 标记选项。
或者
要仅将标记应用到正在标记的影像，选择仅将标记应用于我正在标记的影像选项。
11. 要在标记时显示周长框的高度和角度的默认线，选择标记时显示线复选框。
12. 要设置相对于默认脊柱大小的脊柱大小百分比，从列表中选择百分比。
13. 要保存设置并关闭对话框，单击确定。
14. 要保存更改并关闭“自定义”对话框，单击确定。

配置基于会话的脊柱标记首选项


1. 从“影像”区域关联工具条或顶端工具栏中，单击脊柱标注。
- 或者
如果使用关联工具条文本菜单 (Ctrl+单击右键)，请选择标记 > 脊柱标注。

2. 在“脊柱标注”对话框中，从当前标记列表中，选择要开始标记的脊柱的水平。
3. 要从脊柱的低级到高级进行标记，选择从低级到高级进行标记复选框。
或者
要从脊柱的高级到低级进行标记，清除从低级到高级进行标记复选框。
4. 要仅标记椎骨，选择标记椎骨复选框。
5. 要仅标记椎间盘，选择标记椎间盘复选框。
6. 要在标记时显示周长框的高度和角度的默认线，选择标记时显示线复选框。
7. 如果需要简化带额外椎骨的脊柱的标记，选择包括 C8 和/或包括 L6 复选框。


应用脊柱标记

1. 显示包含矢状面影像的 CT、MR 或其它脊柱检查。
2. 单击要标记的矢状面 (或可能是冠状面) 影像。
3. 从“影像”区域关联工具条或顶端工具栏中，单击脊柱标注。
- 或者
如果使用关联工具条文本菜单 (Ctrl+单击右键)，请选择标记 > 脊柱标注。
4. 在“脊柱标注”对话框中，根据需要更改所有基于会话的首选项。
5. 要应用标记，单击脊柱上正确的位置。
6. 应用标记后，您还可以：
7. 放置全部标记后，可右键单击鼠标或单击关闭“脊柱标注”对话框。
8. 如有必要，保存脊柱标记。



重定位脊柱标记

1. 从“影像”区域关联工具条或顶端工具栏中，单击脊柱标注。
- 或者



如果使用关联工具条文本菜单 (Ctrl+ 右键单击)，请选择标记 > 脊椎标注。

2. 在“脊柱标注”对话框中，单击移动标记。
3. 选择标记 (如 L5) 并用鼠标，将其移动到所需水平位置。




更改脊柱标记周长框的大小


1. 在“脊柱标注”对话框中，如果启用了更改角度隐藏/显示切换，单击它便可启用更改大小隐藏/显示切换。
2. 使用鼠标滚轮调整框的大小。

更改脊柱标记周长框的角度

1. 在“脊柱标注”对话框中，如果启用了更改大小隐藏/显示切换，单击它便可启用更改角度隐藏/显示切换。
2. 使用鼠标滚轮调整框的角度。

删除脊柱标记

1. 从“影像”区域关联工具条或顶端工具栏中，单击脊柱标注。
- 或者
如果使用关联工具条文本菜单 (Ctrl+ 右键单击)，请选择标记 > 脊柱标注。
2. 要针对 3D 删除某个级别中的标记：
 - a. 在“脊柱标注”对话框中，单击删除标记。
 - b. 单击标注，以便矩形框可以放置在标记上方。
 - c. 单击要删除的标记。
 - d. 根据需要重复步骤 c。
 - e. 要禁用删除模式，单击删除卷标。

3. 要删除所有级别中的所有标记，在“脊柱标注”对话框中，单击删除全部标记。

常规脊柱标记工具

按钮	名称	用途
	更改角度	调整脊柱标记周长框的角度
	更改大小	调整脊柱标记周长框的大小
	删除标记	删除所选脊柱标记
	删除所有标记	删除所有脊柱标记
	移动标记	将所选脊柱标记移动到其它位置
	脊柱标注	向轴位 CR、CT 或 MR 影像应用脊柱标记可表示影像与脊柱的哪个部分相交