

登入 IMPAX

- 若登入畫面未顯示, 請在桌面上用滑鼠右鍵按一下 IMPAX Client 捷徑。
或選取「開始」>「所有程式」> Agfa IMPAX > IMPAX Client。
- 選取不同的群集器或網域。
- 在 IMPAX 登入畫面中輸入您的「使用者識別碼」與「密碼」。
密碼區分大小寫。若您的鍵盤啟用了 Caps Lock, 則當您按一下「密碼」欄位時, 系統即會顯示警告訊息。
- 按一下「登入」。

使用「搜尋」來尋找病患

- 在「清單」區域中, 按一下「搜尋」列以展開搜尋區域。
- 在「姓名」欄位中輸入病患姓名。
或在「病歷號碼」或「整體病患 ID」欄位中輸入病患的 ID。
- 從「現在病患位置」清單選取「任何」。
- 或者, 您也可以選擇要搜尋的日期。
- 按一下「搜尋」。

從工作清單開啟檢查

- 如果只想在「文字」區域中開啟影像, 請用滑鼠右鍵按一下檢查, 然後選取開啟文字。
或
若要開啟檢查的影像, 請用滑鼠右鍵按一下檢查, 然後選取開啟影像。
- 若要隨檢查開啟先前相關檢查, 請按一下「相關性」。


變更檢查螢幕格式

- 從「影像」區域頂端工具列按一下「選擇螢幕顯示格式」。

- 從「螢幕格式」選單中按一下要套用的格式按鈕。

顯示「文字」區域

- 從「影像」區域頂端工具列按一下「文字」。

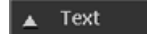

- 從「文字」區域按一下「文字」。



從檢查清單中瀏覽先前報告

- 顯示感興趣病患的「文字」區域。
- 若「檢查清單」在「文字」區域中隱藏起來, 請按一下可展開列上的箭頭。
- 如果「檢查清單」被收合起來, 請按一下「檢查清單」列以展開面板。
- 如有必要, 請切換至放射科標籤。
- 若要檢視和先前檢查有關的報告, 請在先前檢查列上的任意處按一下。
- 若要關閉檢查影像但維持其關連文字顯示在「文字」區域中, 請按一下「正在顯示影像」。

檢視報告

- 顯示感興趣病患/檢查的「文字」區域。
- 在「文字」區域中, 如果「報告」面板被收合起來, 請按一下「報告」列以展開面板, 並檢視其中的報告。
- 若要檢視這名病患的其他報告, 請在「檢查清單」中按一下已錄製的檢查報告。
- 此外, 如果報告有其他連結的關鍵影像, 您也可以檢視這些關鍵影像。
- 若報告是來自 IMPAX RIS, 請選取適當的報告檢視。
- 若要放大關鍵影像, 請將游標放在關鍵影像的左側, 直到指標變成雙箭頭圖示。將關鍵影像拖曳到您所需的大小。
- 若要在「影像」區域中開啟關鍵影像, 請在關鍵影像上按一下滑鼠右鍵後選取「顯示」。

在「文字」區域中檢視關鍵影像

- 在「文字」區域中, 如果報告被收合起來, 請按一下「報告」列顯示報告。
- 若「關鍵影像」區域被收合起來, 請按一下可展開列的箭頭或按一下「關鍵影像」。
- 若要放大關鍵影像, 請將「關鍵影像」可展開列拖曳成您所需的大小。
- 若要在「影像」區域中開啟包含關鍵影像的檢查, 請連按兩下關鍵影像, 或在影像上按一下滑鼠右鍵後選取「顯示」。


鍵盤快捷鍵: 清單區域

到	按
開啟「知識庫」。	F1

鍵盤快捷鍵: 影像區域

若要	按
往前導覽至檢查中的下一頁、下一張影像或下一個標籤(視「按工具瀏覽」的狀態而定)。	Page Down *
往後導覽至檢查中的上一頁、上一張影像或上一個標籤(視「按工具瀏覽」的狀態而定)。	Page Up *
往前導覽至循環清單中的下一個病患, 或開啟病患檢查。	向右箭頭
往後導覽至循環清單中的上一個病患, 或開啟病患檢查。	向左箭頭
導覽至序列的第一張影像。	主介面
往前導覽至目前病患的下一個檢查。	向上箭頭
往後導覽至目前病患的上一個檢查。	向下箭頭
導覽至序列的最後一張影像。	結束

若要	按
依定位影像切片導覽時，返回第一個畫面。	主介面
在「放大縮小」工具內放大影像。	Page Up *
在「放大縮小」工具內縮小影像。	Page Down *
在「放大縮小」工具內回復原始放大比率。	主介面
使用「放大鏡」工具增加放大比率。	Page Up **
使用「放大鏡」工具降低放大比率。	Page Down **
回復「放大鏡」工具的原始放大比率。	主介面
開啟「自訂」對話方塊。	F12
開啟 IMPAX 6.5.1 用戶端 知識庫。	F1

按鈕	名稱	使用
	放大至全螢幕	將單一影像放大為全螢幕尺寸

常用臨床複查工具

按鈕	名稱	使用
	連續播放檢視器	連續或逐一播放序列影像
	複合式配置選擇器	以自訂配置方式將一張或多張檢查影像列印到底片或紙張上
	放大鏡	可另外開啟一個新視窗，顯示其下放大的影像區域
	量尺標示	測量兩點間的距離
	固定/取消固定檢查	固定檢查並在瀏覽該病患的其他檢查時保持顯示狀態
	選擇螢幕格式	定義影像、影像序列，及檢查在「影像」區域螢幕上的欄與列中的編排方式
	檢視整份報告	在「文字」區域的「報告」面板顯示整份報告
	視窗值	藉由調整視窗中心值及視窗寬度值來變更影像的亮度和對比度，並存取預設的視窗值
	放大縮小	逐漸放大或縮小影像