

IMPAX 6.5.1 快速參考: 急診室



登入 IMPAX

1. 若登入畫面未顯示, 請在桌面上用滑鼠右鍵按一下 IMPAX Client 捷徑。
或選取「開始」>「所有程式」> Agfa IMPAX > IMPAX Client。
2. 選取不同的群集器或網域。
3. 在 IMPAX 登入畫面中輸入您的「使用者識別碼」與「密碼」。
密碼區分大小寫。若您的鍵盤啟用了 Caps Lock, 則當您按一下「密碼」欄位時, 系統即會顯示警告訊息。
4. 按一下「登入」。

使用「搜尋」來尋找病患

1. 在「清單」區域中, 按一下「搜尋」列以展開搜尋區域。
2. 在「姓名」欄位中輸入病患姓名。
或在「病歷號碼」或「整體病患 ID」欄位中輸入病患的 ID。
3. 從「現在病患位置」清單選取「任何」。
4. 或者, 您也可以選擇要搜尋的日期。
5. 按一下「搜尋」。

從工作清單開啟檢查

1. 如果只想在「文字」區域中開啟影像, 請用滑鼠右鍵按一下檢查, 然後選取開啟文字。
或
若要開啟檢查的影像, 請用滑鼠右鍵按一下檢查, 然後選取開啟影像。
2. 若要隨檢查開啟先前相關檢查, 請按一下「相關性」。

從檢查清單中瀏覽先前報告

1. 顯示感興趣病患的「文字」區域。

2. 若「檢查清單」在「文字」區域中隱藏起來, 請按一下可展開列上的箭頭。
3. 如果「檢查清單」被收合起來, 請按一下「檢查清單」列以展開面板。
4. 如有必要, 請切換至放射科標籤。
5. 若要檢視和先前檢查有關的報告, 請在先前檢查列表上的任意處按一下。
6. 若要關閉檢查影像但維持其關連文字顯示在「文字」區域中, 請按一下「正在顯示影像」。

新增自由填寫檢查註解

1. 顯示感興趣檢查的「文字」區域。
2. 捲動至「報告」面板。
3. 若未顯示, 請切換至「檢查註解」標籤。
4. 在文字方塊中輸入註解。
5. 若要使檢查註解呈現私人狀態, 請按一下「設定為私人」。
6. 按一下「儲存」。

依據影像檢查設備類型插入偏好的檢查註解

1. 顯示感興趣檢查的「文字」區域。
2. 捲動至「報告」面板。
3. 若未顯示, 請切換至「檢查註解」標籤。
4. 按一下「偏好的檢查註解」。
5. 在「偏好的檢查註解」對話方塊中, 從清單的「偏好的檢查註解」中選取一個影像檢查設備 (以檢視特定影像檢查設備可看的註解) 或選取「全部」 (以檢視所有影像檢查設備可看的註解)。
6. 選取要插入的註解 (使用 Shift 或 Ctrl 鍵來選取多個偏好的註解)。
7. 按一下「確定」。

檢視報告

1. 顯示感興趣病患/檢查的「文字」區域。

2. 在「文字」區域中, 如果「報告」面板被收合起來, 請按一下「報告」列以展開面板, 並檢視其中的報告。
3. 若要檢視這名病患的其他報告, 請在「檢查清單」中按一下已錄製的檢查報告。
4. 此外, 如果報告有其他連結的關鍵影像, 您也可以檢視這些關鍵影像。
5. 若報告是來自 IMPAX RIS, 請選取適當的報告檢視。
6. 若要放大關鍵影像, 請將游標放在關鍵影像的左側, 直到指標變成雙箭頭圖示。將關鍵影像拖曳到您所需的大小。
7. 若要在「影像」區域中開啟關鍵影像, 請在關鍵影像上按一下滑鼠右鍵後選取「顯示」。



鍵盤快捷鍵: 清單區域

到	按
開啟「知識庫」。	F1

鍵盤快捷鍵: 影像區域

若要	按
往前導覽至檢查中的下一頁、下一張影像或下一個標籤 (視「按工具瀏覽」的狀態而定)。	Page Down *
往後導覽至檢查中的上一頁、上一張影像或上一個標籤 (視「按工具瀏覽」的狀態而定)。	Page Up *
往前導覽至循環清單中的下一個病患, 或開啟病患檢查。	向右箭頭
往後導覽至循環清單中的上一個病患, 或開啟病患檢查。	向左箭頭
導覽至序列的第一張影像。	主介面
往前導覽至目前病患的下一個檢查。	向上箭頭

若要	按
往後導覽至目前病患的上一個檢查。	向下箭頭
導覽至序列的最後一張影像。	結束
依定位影像切片導覽時，返回第一個畫面。	主介面
在「放大縮小」工具內放大影像。	Page Up *
在「放大縮小」工具內縮小影像。	Page Down *
在「放大縮小」工具內回復原始放大比率。	主介面
使用「放大鏡」工具增加放大比率。	Page Up **
使用「放大鏡」工具降低放大比率。	Page Down **
回復「放大鏡」工具的原始放大比率。	主介面
開啟「自訂」對話方塊。	F12
開啟 IMPAX 6.5.1 用戶端 知識庫。	F1

按鈕	名稱	使用
	放大縮小	逐漸放大或縮小影像
	放大至全螢幕	將單一影像放大為全螢幕尺寸

常用臨床複查工具

按鈕	名稱	使用
	連續播放檢視器	連續或逐一播放序列影像
	複合式配置選擇器	以自訂配置方式將一張或多張檢查影像列印到底片或紙張上
	放大鏡	可另外開啟一個新視窗，顯示其下放大的影像區域
	量尺標示	測量兩點間的距離
	固定/取消固定檢查	固定檢查並在瀏覽該病患的其他檢查時保持顯示狀態
	選擇螢幕格式	定義影像、影像序列，及檢查在「影像」區域螢幕上的欄與列中的編排方式
	檢視整份報告	在「文字」區域的「報告」面板顯示整份報告
	視窗值	藉由調整視窗中心值及視窗寬度值來變更影像的亮度和對比度，並存取預設的視窗值