

IMPAX 6.5.1 快速參考: 重症監護病房


登入 IMPAX

1. 若登入畫面未顯示, 請在桌面上用滑鼠右鍵按一下 IMPAX Client 捷徑。
或選取「開始」>「所有程式」> Agfa IMPAX > IMPAX Client。
2. 選取不同的群集器或網域。
3. 在 IMPAX 登入畫面中輸入您的「使用者識別碼」與「密碼」。
密碼區分大小寫。若您的鍵盤啟用了 Caps Lock, 則當您按一下「密碼」欄位時, 系統即會顯示警告訊息。
4. 按一下「登入」。


使用「搜尋」來尋找病患

1. 在「清單」區域中, 按一下「搜尋」列以展開搜尋區域。
2. 在「姓名」欄位中輸入病患姓名。
或在「病歷號碼」或「整體病患 ID」欄位中輸入病患的 ID。
3. 從「現在病患位置」清單選取「任何」。
4. 或者, 您也可以選擇要搜尋的日期。
5. 按一下「搜尋」。

從工作清單開啟檢查


1. 如果只想在「文字」區域中開啟影像, 請用滑鼠右鍵按一下檢查, 然後選取開啟文字。
或
若要開啟檢查的影像, 請用滑鼠右鍵按一下檢查, 然後選取開啟影像。
2. 若要隨檢查開啟先前相關檢查, 請按一下「相關性」。

變更檢查螢幕格式


1. 從「影像」區域頂端工具列按一下「選擇螢幕顯示格式」。

2. 從「螢幕格式」選單中按一下要套用的格式按鈕。


測量兩點間的距離

1. 從「影像」區域頂端工具列的「標示」按鈕選單中, 選取「標示量尺」。
2. 在影像上按一下區域的起點。
3. 再按一下終點。
4. 若要移動測量文字, 請將中心控制點拖曳到新的位置上。
5. 若要變更測量, 請將終點控制點拖曳到新的位置上。
6. 若要設定測量, 請用滑鼠右鍵按一下。
7. 若要刪除測量, 請按下「刪除」鍵。

顯示檢查清單中的先前檢查

1. 在「文字」區域中, 切換至「放射科」標籤。
2. 若要顯示目前未開啟的檢查, 請按一下「開啟影像」。

檢視檢查敘述

1. 顯示感興趣檢查的「文字」區域。
2. 在「文字」區域中, 如果「檢查」面板被收合起來, 請按一下「檢查」列以展開面板。
3. 若要展開「檢查」面板, 請將可展開列拖曳到左側, 或者將「檢查」列往上拉。
4. 若要取得列在「檢查」面板內的醫師或技師聯絡資訊, 請按一下「聯絡」。

檢視報告

1. 顯示感興趣病患/檢查的「文字」區域。
2. 在「文字」區域中, 如果「報告」面板被收合起來, 請按一下「報告」列以展開面板, 並檢視其中的報告。
3. 若要檢視這名病患的其他報告, 請在「檢查清單」中按一下已錄製的檢查報告。

4. 此外, 如果報告有其他連結的關鍵影像, 您也可以檢視這些關鍵影像。
5. 若報告是來自 IMPAX RIS, 請選取適當的報告檢視。
6. 若要放大關鍵影像, 請將游標放在關鍵影像的左側, 直到指標變成雙箭頭圖示。將關鍵影像拖曳到您所需的大小。
7. 若要在「影像」區域中開啟關鍵影像, 請在關鍵影像上按一下滑鼠右鍵後選取「顯示」。

鍵盤快捷鍵: 清單區域

到	按
開啟「知識庫」。	F1

鍵盤快捷鍵: 影像區域

若要	按
往前導覽至檢查中的下一頁、下一張影像或下一個標籤(視「按工具瀏覽」的狀態而定)。	Page Down *
往後導覽至檢查中的上一頁、上一張影像或上一個標籤(視「按工具瀏覽」的狀態而定)。	Page Up *
往前導覽至循環清單中的下一個病患, 或開啟病患檢查。	向右箭頭
往後導覽至循環清單中的上一個病患, 或開啟病患檢查。	向左箭頭
導覽至序列的第一張影像。	主介面
往前導覽至目前病患的下一個檢查。	向上箭頭
往後導覽至目前病患的上一個檢查。	向下箭頭
導覽至序列的最後一張影像。	結束
依定位影像切片導覽時, 返回第一個畫面。	主介面

若要	按
在「放大縮小」工具內放大影像。	Page Up *
在「放大縮小」工具內縮小影像。	Page Down *
在「放大縮小」工具內回復原始放大比率。	主介面
使用「放大鏡」工具增加放大比率。	Page Up **
使用「放大鏡」工具降低放大比率。	Page Down **
回復「放大鏡」工具的原始放大比率。	主介面
開啟「自訂」對話方塊。	F12
開啟 IMPAX 6.5.1 用戶端 知識庫。	F1

常用臨床複查工具

按鈕	名稱	使用
	連續播放檢視器	連續或逐一播放序列影像
	複合式配置選擇器	以自訂配置方式將一張或多張檢查影像列印到底片或紙張上
	放大鏡	可另外開啟一個新視窗，顯示其下放大的影像區域
	量尺標示	測量兩點間的距離
	固定/取消固定檢查	固定檢查並在瀏覽該病患的其他檢查時保持顯示狀態
	選擇螢幕格式	定義影像、影像序列，及檢查在「影像」區域螢幕上的欄與列中的編排方式
	檢視整份報告	在「文字」區域的「報告」面板顯示整份報告
	視窗值	藉由調整視窗中心值及視窗寬度值來變更影像的亮度和對比度，並存取預設的視窗值
	放大縮小	逐漸放大或縮小影像
	放大至全螢幕	將單一影像放大為全螢幕尺寸