

IMPAX 6.5.1 快速參考: 骨科

登入 IMPAX

1. 若登入畫面未顯示，請在桌面上用滑鼠右鍵按一下 IMPAX Client 捷徑。
或選取「開始」>「所有程式」> Agfa IMPAX > IMPAX Client。
2. 選取不同的群集器或網域。
3. 在 IMPAX 登入畫面中輸入您的「使用者識別碼」與「密碼」。
密碼區分大小寫。若您的鍵盤啟用了 Caps Lock，則當您按一下「密碼」欄位時，系統即會顯示警告訊息。
4. 按一下「登入」。

使用「搜尋」來尋找病患

1. 在「清單」區域中，按一下「搜尋」列以展開搜尋區域。
2. 在「姓名」欄位中輸入病患姓名。
或在「病歷號碼」或「整體病患 ID」欄位中輸入病患的 ID。
3. 從「現在病患位置」清單選取「任何」。
4. 或者，您也可以選擇要搜尋的日期。
5. 按一下「搜尋」。

從工作清單開啟檢查

1. 如果只想在「文字」區域中開啟影像，請用滑鼠右鍵按一下檢查，然後選取開啟文字。
或
若要開啟檢查的影像，請用滑鼠右鍵按一下檢查，然後選取開啟影像。
2. 若要隨檢查開啟先前相關檢查，請按一下「相關性」。

在整形外科影像應用程式視窗中開啟影像

1. 在「影像」區域中，使用「選擇影像」工具可選取最多 20 張影像，以供進行術前計畫。

2. 瀏覽至需要進行術前計畫的第一張影像。
3. 從內文或頂端工具列按一下「範本」。
4. 按一下需要進行術前計畫的影像。

顯示檢查清單中的先前檢查

1. 在「文字」區域中，切換至「放射科」標籤。
2. 若要顯示目前未開啟的檢查，請按一下「開啟影像」。

縮放和平移影像

1. 從「影像」區域頂端工具列的「放大縮小」按鈕選單中，選取「放大縮小」。
2. 按一下要縮放的影像。
3. 視需要縮放或平移影像。

將整形外科手術計畫工作匯出至 IMPAX

1. 在「整形外科術前計畫」視窗中按一下「匯出至 PACS」。

複查整形外科植入物資訊

1. 從「影像」區域的內文或頂端工具列中，按一下「影像資訊」。

或若是使用內文工具列的文字選單 (Ctrl + 按一下滑鼠右鍵)，請選取「資訊」>「影像資訊」。

2. 按一下包含植入物詳細資料的影像。

使用複合式配置列印影像

1. 在「影像」區域中顯示所要納入複合式配置列印的影像。
2. 從內文或頂端工具列按一下「複合式配置選擇器」。
3. 若要在所有頁面上列印病患姓名及流水號，請在「複合式配置選擇器」對話方塊中選取「顯示文字起頭」核取方塊。

4. 若要在所有頁面上列印頁碼，請選取「包括頁碼」核取方塊。
5. 若要在列印至紙張時節省碳粉，請選取「於紙張列印使用白色背景」核取方塊。
6. 從「配置」清單中選取要使用的列印配置。
7. 若要列印至 DICOM 底片印表機，請從「印表機」清單中選取要使用的印表機。
8. 若要列印至 DICOM 底片印表機，請從「預設」清單中選取要使用的列印預設。
9. 瀏覽至要列印的影像，將游標放在該影像上，然後將之拖曳到範本的影像元素內。對所有要納入列印的影像重覆執行上述動作。
10. 若要立即列印，請按一下「列印」(底片印表機)或「紙張列印」。
11. 若要列印至紙張印表機，請從 Windows「列印」對話方塊選取列印選項，並按一下「確定」。

鍵盤快捷鍵：清單區域

到	按
開啟「知識庫」。	F1

常用整形外科影像工具

按鈕	名稱	使用
	複合式配置選擇器	以自訂配置方式將一張或多張檢查影像列印到底片或紙張上
	循環	將工作清單中的檢查自動移動至「影像」區域
	影像資訊	顯示病患資料詳情及整形外科植入物詳情，並允許您列印資訊
	選擇影像	選取要在「整形外科影像應用程式」中啟動的影像

按鈕	名稱	使用
	固定/取消固定檢查	固定檢查並在瀏覽該病患的其他檢查時保持顯示狀態
	選擇螢幕格式	定義影像、影像序列，及檢查在「影像」區域螢幕上的欄與列中的編排方式
	範本	在整形外科影像應用程式視窗中開啟影像
	視窗值	藉由調整視窗中心值及視窗寬度值來變更影像的亮度和對比度，並存取預設的視窗值
	放大縮小	逐漸放大或縮小影像

若要	按
使用「放大鏡」工具降低放大比率。	Page Down **
回復「放大鏡」工具的原始放大比率。	主介面
開啟「自訂」對話方塊。	F12
開啟 IMPAX 6.5.1 用戶端 知識庫。	F1

鍵盤快捷鍵：影像區域

若要	按
往前導覽至檢查中的下一頁、下一張影像或下一個標籤(視「按工具瀏覽」的狀態而定)。	Page Down *
往後導覽至檢查中的上一頁、上一張影像或上一個標籤(視「按工具瀏覽」的狀態而定)。	Page Up *
往前導覽至循環清單中的下一個病患，或開啟病患檢查。	向右箭頭
往後導覽至循環清單中的上一個病患，或開啟病患檢查。	向左箭頭
導覽至序列的第一張影像。	主介面
往前導覽至目前病患的下一個檢查。	向上箭頭
往後導覽至目前病患的上一個檢查。	向下箭頭
導覽至序列的最後一張影像。	結束
依定位影像切片導覽時，返回第一個畫面。	主介面
在「放大縮小」工具內放大影像。	Page Up *
在「放大縮小」工具內縮小影像。	Page Down *
在「放大縮小」工具內回復原始放大比率。	主介面
使用「放大鏡」工具增加放大比率。	Page Up **