

IMPAX 6.5.1 快速參考: 放射科




登入 IMPAX

1. 若登入畫面未顯示，請在桌面上用滑鼠右鍵按一下 IMPAX Client 捷徑。
或選取「開始」>「所有程式」> Agfa IMPAX > IMPAX Client。
2. 選取不同的群集器或網域。
3. 在 IMPAX 登入畫面中輸入您的「使用者識別碼」與「密碼」。
密碼區分大小寫。若您的鍵盤啟用了 Caps Lock，則當您按一下「密碼」欄位時，系統即會顯示警告訊息。
4. 按一下「登入」。


將工作清單新增至「清單」區域

1. 在「清單」區域中按一下「工作清單」。
2. 在工作清單旁的「現用」欄中，選取欲顯示的每一份工作清單的核取方塊。
3. 請按 Enter，或按一下「確定」。

循環工作清單中的檢查

1. 若要循環工作清單中的所有檢查或檢查群組，請在工作清單列中按一下自動循環。
2. 若要循環工作清單中的優先順序分組檢查，請在工作清單列中用滑鼠右鍵按一下「自動循環」，然後清除每一個您不想循環其檢查的優先順序分組規則旁的核取方塊。按一下「自動循環」。
3. 若要循環特定檢查，請選取這些檢查，然後用滑鼠右鍵按一下「加入循環清單中」或「循環」。
4. 若要循環多份工作清單，請在各自的工作清單列中按一下「自動循環」。

檢視小波影像

1. 從「清單」或「設定」區域拖曳選單中按一下「使用者識別碼」選單。
2. 務必選取「顯示 Web 影像」。


將「文字」區域與「影像」區域同步

1. 在「影像」區域的檢查資訊面板中，按一下頂端工具列上方的檢查日期/時間或流水號。


將關鍵影像新增至報告

1. 在「影像」區域中，用滑鼠右鍵按一下影像，直到出現內文選單為止。
2. 從內文功能表中選取「增加到關鍵影像」。


顯示最近檢視過的檢查


1. 在「影像」區域中，從瀏覽列按一下「歷史記錄」。
2. 選取欲重新顯示其檢查的病患姓名。

暫時擱置病患的檢查



1. 在「影像」區域左下角的循環控制項旁按一下「暫時擱置」。

手動連結序列



1. 從「影像」區域的內文或頂端工具列中按一下「連結序列」。
2. 在「連結偏好設定」選單中選取「手動連結」核取方塊。
3. 捲動瀏覽影像，直到其對應至相同的解剖區域，以同步每一個要連結的序列。
4. 若要手動將序列連結在一起，請按一下「連結序列」並選取所需的序列。
5. 請注意，文字會有所變更（反白序列為「連結的現用序列」，已連結序列為「按一下來取消連結」），且左上角會顯示一個連結圖示，指出序列已被連結。
6. 若要讓視窗值變更套用至所有已連結序列，請啟用跨連結序列視窗值。
7. 若要使縮放與平移操作套用至所有已連結序列，請啟用跨連結序列縮放與平移。

8. 若要停用「連結編輯模式」並返回一般瀏覽，請按一下「連結序列」。


調整自動連結以移動病患

1. 從「影像」區域的內文或頂端工具列中按一下「連結序列」。
2. 按一下欲調整的序列影像。
3. 瀏覽至對應至檢查中其他序列目前位置的序列位置。
4. 再按一下該影像以重新連結該序列。
5. 若要變更連結，請選取「是 - 在此新位置連結」核取方塊。
6. 若要指出您已完成連結調整，請按一下「連結序列」。

將含有不同參考畫面的序列新增到自動連結群組

1. 從「影像」區域的內文或頂端工具列中按一下「連結序列」。
2. 按一下欲新增至「自動連結」群組的序列。
3. 若要指出您已完成連結修改，且要返回一般瀏覽，請按一下「連結序列」。

依預設值調整視窗值

1. 從「影像」區域頂端工具列，用滑鼠右鍵按一下「視窗值」按鈕選單，然後選取要套用的預設值。
2. 若使用顯示多個序列或檢查的螢幕格式，請按一下來自該序列、要套用預設值的影像。

鍵盤快捷鍵：清單區域

到	按
開啟「知識庫」。	F1

鍵盤快捷鍵：文字區域

到	按
複製教學檔案或資料夾。	Ctrl + C
剪下教學檔案或資料夾。	Ctrl + X
貼上教學檔案或資料夾。	Ctrl + V
重新命名教學檔案或資料夾。	F2

鍵盤快捷鍵：影像區域

若要	按
往前導覽至檢查中的下一頁、下一張影像或下一個標籤(視「按工具瀏覽」的狀態而定)。	Page Down *
往後導覽至檢查中的上一頁、上一張影像或上一個標籤(視「按工具瀏覽」的狀態而定)。	Page Up *
往前導覽至循環清單中的下一個病患，或開啟病患檢查。	向右箭頭
往後導覽至循環清單中的上一個病患，或開啟病患檢查。	向左箭頭
導覽至序列的第一張影像。	主介面
往前導覽至目前病患的下一個檢查。	向上箭頭
往後導覽至目前病患的上一個檢查。	向下箭頭
導覽至序列的最後一張影像。	結束
依定位影像切片導覽時，返回第一個畫面。	主介面
在「放大縮小」工具內放大影像。	Page Up *
在「放大縮小」工具內縮小影像。	Page Down *
在「放大縮小」工具內回復原始放大比率。	主介面
使用「放大鏡」工具增加放大比率。	Page Up **
使用「放大鏡」工具降低放大比率。	Page Down **
回復「放大鏡」工具的原始放大比率。	主介面
開啟「自訂」對話方塊。	F12
開啟 IMPAX 6.5.1 用戶端 知識庫。	F1

常用放射科工具

按鈕	名稱	使用
	連續播放檢視器	連續或逐一播放序列影像
	循環	自動將工作清單中的檢查移入「影像」區域
	錄製報告	開始錄製單一檢查報告
	錄製報告 - 多重檢查	開始錄製兩個或多個檢查的報告
	反相	對調影像的黑白區域
	標示註解	將不規則形標示文字加入影像
	箭頭標示	放置箭頭標示，以指出興趣區
	量尺標示	測量兩點間的距離
	Volume Viewing	將序列啟動到「Volume Viewing」視窗，以便進行 MIP、MPR 及 (若已獲得授權) 3D 分析
	視窗值	藉由調整視窗中心值及視窗寬度值來變更影像的亮度和對比度，並存取預設的視窗值
	放大縮小	逐漸放大或縮小影像