


# IMPAX 6.5.1 快速參考: IMPAX Reporting 管理員




## 設定 IMPAX RIS Client

1. 將 TEXTAREA.DISABLE\_ONLINE 參數設定為 1。
2. 將 SPEECH.INSTALLED 參數設定為 1。
3. 視需要設定其他 IMPAX RIS 參數。

## 將 IMPAX RIS 使用者對應至 IMPAX 使用者

1. 從「設定」拖曳選單  中選取「使用者和角色」。
2. 在瀏覽窗格中選取使用者。
3. 在詳細資料窗格中，展開「使用者」列。
4. 切換至「對應」標籤。
5. 在「Agfa RIS 使用者 ID」欄位中輸入 IMPAX RIS 使用者 ID。
6. 按一下「套用」。

## 在 IMPAX 中定義 IMPAX Reporting 的報告錄製權限

1. 從「設定」拖曳選單  中選取「使用者和角色」。
2. 在瀏覽窗格中選取要設定的角色。
3. 在詳細資料窗格中，展開「權限」列。
4. 選取「以檢查為基礎的」標籤。
5. 在「權限」下，從清單選取一個權限。
6. 從「指定操作，從」清單中選取 PACS 用戶端。
7. 在「操作」下選取要將哪些權限指定給檢查。


必須選取「以放射科醫師的身份錄製檢查報告」或「以住院醫師的身份錄製檢查報告」，以允許使用者在 IMPAX 用戶端上初始化新報告。

## 設定工作站，以從 IMPAX RIS 與 IMPAX 資料庫擷取資料

1. 從「設定」拖曳選單  中選取「工作站」。

2. 將「網際網路」工作站容器中的所有工作站拖曳至 IMPAX RIS 工作站容器。
3. 選取 IMPAX RIS 工作站容器。
4. 切換至「服務存取」標籤。
5. 將 mvf 從相關的 Web 服務 URL 中移除。

## 決定開啟檢查時，要在「文字」區域中顯示的內容


1. 從「設定」拖曳選單  中選取「偏好設定」。
2. 若在「設定」區域內，請在瀏覽窗格中選取角色或使用者。
3. 在詳細資料窗格中，展開「文字區域」列。
4. 切換至「行為」標籤。
5. 在「檢查有報告」下選取開啟含有報告的檢查時，要顯示在「文字」區域的內容。
6. 若您選取「顯示報告」選項，則您必須指定要顯示的預設報告類型。
7. 在「檢查沒有報告」下選取開啟不含有報告的檢查時，要顯示在「文字」區域中的內容。
8. 若已於步驟 5 及/或 7 在「如果沒有任何掃描或 Q 和 A 可用」下選取「顯示掃描」或「顯示 Q 和 A」，請選取開啟含有掃描或 Q 和 A 的檢查時，要顯示在「文字」區域中的內容。
9. 若處於「設定」區域內，轉換背景時，系統會自動儲存變更。

## 選取 IMPAX Reporting 以錄製報告



1. 從「設定」拖曳選單  中選取「偏好設定」。
2. 若在「設定」區域內，請在瀏覽窗格中選取角色或使用者。
3. 在詳細資料窗格中，展開「文字區域」列。
4. 在「報告」標籤上選取 IMPAX Reporting (適用於 IMPAX Reporting)。
5. 在「資料庫」欄位中輸入 IMPAX RIS 資料庫的名稱。

6. 若要使用 IMPAX Reporting 及嵌入式語音整合，請選取「使用 IMPAX Reporting 建立報告及錄製報告」。
7. 若已選取 IMPAX Reporting 選項，且欲使用 Nuance SpeechMagic InterActive 來進行線上語音識別，請選取「使用 SpeechMagic InterActive 進行線上語音識別」。
8. 若處於「設定」區域內，轉換背景時，系統會自動儲存變更。

## 在現有報告中指定補充內容及狀態行位置


1. 從「設定」拖曳選單  中選取「偏好設定」。
2. 若在「設定」區域內，請在瀏覽窗格中選取角色或使用者。
3. 在詳細資料窗格中，展開「文字區域」列。
4. 切換至「組態選項」標籤。
5. 決定將補充內容新增至現有報告的位置。
6. 決定插入補充內容狀態行的位置。
7. 若處於「設定」區域內，轉換背景時，系統會自動儲存變更。

## 決定組態選項 - IMPAX Reporting

1. 從「設定」拖曳選單  中選取「偏好設定」。  
或者，按一下「清單」區域或「設定」區域列的「使用者識別碼」選單 ，然後選取「偏好設定」。
2. 若在「設定」區域內，請在瀏覽窗格中選取角色或使用者。
3. 在詳細資料窗格中，展開「文字區域」列。
4. 切換至「組態選項」標籤。
5. 若要在「報告」面板中決定 Microsoft Word 的檢視模式，請選取下列其中一個選項：
6. 若要在建立新報告時將登入使用者名稱傳入放射科醫師欄位，請選取「建立新報告時指定使用者至檢查」核取方塊。

7. 若要在使用者檢視報告時自動顯示所有報告備註，請選取「當有可用的報告時，會自動彈出報告備註」核取方塊。
8. 若要顯示標準文字面板，請選取「顯示標準文字面板」核取方塊。
9. 若處於「設定」區域內，轉換背景時，系統會自動儲存變更。  
或者，若在「偏好設定」對話方塊中，請按一下「確定」。

## 確認安裝及組態 - IMPAX Reporting

1. 開啟檢查。
2. 在詳細資料窗格中，展開「文字區域」。
3. 若要開啟「服務」視窗，請在「報告」面板中按一下「服務視窗」
4. 確定「服務」視窗中的所有項目均標上 V。

## 建立簽署工作清單

1. 在「清單」區域中按一下「工作清單」。
2. 在「標準工作清單」下的「工作清單資料庫」中，按一下「新增」。
3. 在「工作清單名稱」欄位中，輸入描述該工作清單目的的名稱。
4. 從「工作清單類型」清單中選取「簽署工作清單」。
5. 切換至「組織」標籤並選取工作清單在角色階層中所在的位置。
6. 切換至「醫師」標籤，並選取使用此工作清單來簽署報告的放射科醫師（使用 Shift 及 Ctrl 鍵）。
7. 按一下「確定」。

## 建立代理簽署工作清單

1. 在「清單」區域中按一下「工作清單」。
2. 在「標準工作清單」下的「工作清單資料庫」中，按一下「新增」。
3. 在「工作清單名稱」欄位中，輸入描述該工作清單目的的名稱。
4. 從「工作清單類型」清單中選取「簽署工作清單」。

5. 切換至「組織」標籤並選取工作清單在角色階層中所在的位置。
6. 切換至「醫師」標籤，並選取「代理簽署」核取方塊。
7. 選取代理簽署工作清單適用的放射科醫師。
8. 按一下「確定」。

## 將摘要工作清單按鈕新增到「清單」區域

1. 在「清單」區域用滑鼠右鍵按一下「精靈」工具列，然後選取「新增」。
2. 在「精靈」對話方塊的「精靈名稱」欄位中輸入新摘要精靈的名稱。
3. 在「顯示文字」欄位中輸入要顯示在精靈按鈕上的文字。
4. 在「工具秘訣」欄位中輸入將游標放置在精靈按鈕上時要顯示的說明文字。
5. 在「指令碼」欄位中輸入（或複製指令碼範例後貼上）要執行的指令碼。
6. 為確保指令碼語法正確無誤，請按一下「測試」。
7. 完成後按一下「確定」。