

IMPAX 6.5.1 快速參考: 搜尋



使用「搜尋」來尋找檢查

1. 在「清單」區域中，按一下「搜尋」列以展開搜尋區域。
2. 若要顯示額外的搜尋條件欄位，請用滑鼠右鍵按一下以存取「設定」對話方塊。
3. 若要縮小搜尋範圍，請輸入或選取搜尋選項。
4. 或者，若要將這些結果新增到先前的搜尋結果中，請選取「將結果增加至最後一個搜尋」核取方塊。
5. 必要時，請選取不同的搜尋位置。
6. 按一下「搜尋」。

使用「搜尋」來尋找病患

1. 在「清單」區域中，按一下「搜尋」列以展開搜尋區域。
2. 在「姓名」欄位中輸入病患姓名。
或在「病歷號碼」或「整體病患 ID」欄位中輸入病患的 ID。
3. 從「現在病患位置」清單選取「任何」。
4. 或者，您也可以選擇要搜尋的日期。
5. 按一下「搜尋」。

選取搜尋日期範圍

1. 從日期條件清單中選取「在前...內」或「早於」。
2. 在「搜尋」對話方塊中輸入或選取數字。
3. 若要在「小時」、「天」、「週」、「月」或「年」之間切換，請按一下「單位」按鈕。
4. 按一下「確定」。

搜尋特定日期的檢查

1. 在「搜尋」或「進階搜尋」中，從日期條件清單選取「任何日期」、「今天」或「昨天」。
或
選取「完全符合」。在「搜尋」對話方塊中按一下清單箭頭。在「行事曆」中，瀏覽至並按一下所需日期。按一下「確定」。

在某一日期範圍內搜尋

1. 從日期條件清單中選取「期間」。
2. 在「搜尋」對話方塊中選取「從」清單，並在「行事曆」中按一下所需的日期。
3. 選取「到」清單，並在「行事曆」中按一下所需的日期。
4. 按一下「確定」。

將搜尋結果新增到先前的搜尋

1. 若要縮小搜尋範圍，請輸入或選取搜尋選項。
2. 按一下「搜尋」。
3. 視需要變更搜尋選項。
4. 在「搜尋」區域中選取「將結果增加至最後一個搜尋」核取方塊。
5. 按一下「搜尋」。

設定搜尋

1. 在「搜尋」結果中用滑鼠右鍵按一下欄標頭。
2. 用滑鼠右鍵按一下欄標頭，以顯示「自訂」選項盤。
3. 必要時，新增或移除欄。
4. 必要時，重新排序欄。
5. 若要停用自動調整欄大小，請清除「自動調整大小」核取方塊。
6. 完成時，請關閉「自訂」對話方塊。

搜尋提示

- 您可以在搜尋值裡面加上萬用字元 * (星號)，提高傳回正確結果的可能性。例如，在「病患 ID」欄位輸入 4*3 會傳回所有病歷號碼以 4 開頭且包含 3 的所有病患。萬用字元可以放在字串的開頭或中間。搜尋時會自動於搜尋條件結尾放置一個星號。
- 您的系統管理員會設定可顯示的檢查最大數。若找到的檢查數 (於「搜尋」列中註明) 大於該數字，請縮小搜尋條件並再搜尋一次。

- 系統不支援無限制的搜尋。如果針對「檢查日期」選取「任何日期」，您必須再選取其他特定搜尋條件。
- 如果您需要進行更複雜的搜尋，請聯絡您的 PACS 管理員為您設定「進階搜尋」的存取權限。
- 企業可用滑鼠左鍵按一下「檢查清單」中的「尋找其他檢查」連結來手動提出詢問。

搜尋選項

條件	敘述
流水號	輸入與該病患的檢查相關聯的流水號。
身體部位	選取進行過檢查的身體部位或選取「任何」。
註解內容	輸入檢查註解的任一部份。 在「設定」對話方塊中，此選項標記為「檢查之註解」。
現在病患位置	輸入或選取病患現在的位置，或選取「編輯...」來開啟「編輯偏好的搜尋項目」對話方塊。從清單中選取現在病患位置並按一下「確定」。
部門	輸入或選取執行檢查的部門，或選取... (省略符號) 來開啟「選取偏好的搜尋目標」對話方塊。從清單中選取部門並按一下「確定」。
描述內容	輸入檢查描述的任一部份。 在「設定」對話方塊中，此選項標記為「檢查之敘述」。
整體病患 ID	輸入完整或部分「整體病患 ID」。病患可以橫跨企業中的不同資訊系統擁有多個病患 ID。透過提供一個針對病患不會變更且絕不會用於其他病患的識別碼，「整體病患 ID」可以與這些多 ID 建立連結。
機構	選取執行檢查時所在的機構名稱，或選取... (省略符號) 來開啟「偏好」對話方塊。從清單中選取機構並按一下「確定」。
關鍵影像標題	從清單中輸入或選取在其中組織關鍵影像的關鍵影像文件標題。
關鍵字	從清單中輸入或選取已經與檢查關聯的關鍵字。
影像檢查設備	選取要搜尋的影像檢查設備類型或選取「任何」。

條件	敘述
	在多個 IMPAX 群集器組態中，IMPAX Data Center 可作為中央存檔，請勿將「影像檢查設備」作為搜尋選項使用。
操作者	輸入執行檢查的操作者的完整或部分名稱。
其他病歷號碼	輸入完整或部分替代病歷號碼。
患者年齡	取得檢查之後，選取病患的年齡。在「條件」對話方塊中，指定參數並按一下「確定」。若要在「小時」、「天」、「週」、「月」、「年」之間切換，請按一下單位按鈕。 在「設定」對話方塊中，此選項標記為「採集時患者年齡」。
病患生日	輸入日期，或從行事曆中選取要搜尋的日期範圍，或選取「任何日期」。以紅色反白的文字指示日期格式無效。 請注意，如果選取「任何日期」，必須同時選取其他搜尋條件。系統不支援無限制的搜尋。
患者歷史記錄包含	輸入完整或部分患者歷史記錄資訊。 在「設定」對話方塊中，此選項標記為「額外其他病史」。
病歷號碼	輸入病歷號碼。
患者姓名	輸入完整或部分病患姓名。 在「設定」對話方塊中，此選項標記為「病患姓名」。
病患性別	任何、男性、女性、其他
執行醫師	輸入或選取執行醫師的完整或部分姓名，或選取... (省略符號) 來開啟「選取偏好的搜尋目標」對話方塊。從清單中選取執行醫師並按一下「確定」。
程序碼包含	輸入申請程序的完整或部分文字。 在「設定」對話方塊中，此選項標記為「申請的程序」。
放射科醫師	輸入或選取錄製檢查報告的放射科醫師的完整或部分姓名，或選取... 來開啟「選取偏好的搜尋目標」對話方塊。從清單中選取放射科醫師並按一下「確定」。
轉診醫師	輸入或選取轉診醫師的完整或部分姓名，或選取... 來開啟「選取偏好的搜尋目標」對話方塊。從清單中選取轉診醫師並按一下「確定」。
申請醫師	輸入或選取申請醫師的完整或部分姓名，或選取... (省略符號) 來開啟「選取偏好的搜尋目標」對話方塊。從清單中選取申請醫師並按一下「確定」。
申請的服務	輸入完整或部分申請檢查之部門的名稱。

條件	敘述
特殊部位	從清單中選取特殊部位，例如「頭」、「胸」、「身體」、「神經」等。 在多個 IMPAX 群集器組態中，IMPAX Data Center 可作為中央存檔，請勿將「特殊部位」作為搜尋選項使用。
狀態	選取檢查的狀態： <ul style="list-style-type: none"> • 任何 • 新增 • 已開始錄製實習醫師報告 • 已錄製實習醫師報告 • 已開始錄製報告 • 已錄製報告 • 已報告 • 已核准 <p>在多個 IMPAX 群集器組態中，IMPAX Data Center 可作為中央存檔，請勿將「狀態」作為搜尋選項使用。</p>
檢查之日期	選取要搜尋的日期範圍，或選取「任何」。如果選取「任何」，必須同時選取其他特定的搜尋條件。系統不支援無限制的搜尋。 對於同一位使用者而言，「任何」搜尋條件在其多次登入期間不會保持不變，因為這很可能會傳回太多搜尋結果。如果選取了「任何」，當您下次登入時，「檢查之日期」的預設值會顯示出來。
查訪號碼包含	輸入完整或部分部門查訪號碼，它可根據病患到訪部門的次數 (包括目前檢查時間) 來尋找檢查。 在「設定」對話方塊中，此選項標記為「科到訪醫師數目」。