


設定脊椎標記預設值


1. 若要針對其他使用者設定偏好設定，請模擬使用者或角色。
2. 在「影像」區域顯示軸向影像。
3. 按下 F12 或從「影像」區域的頂端工具列按一下「自訂」。
4. 在「自訂」對話方塊中，切換至「使用者資料」標籤。
5. 在「使用者資料」標籤上，切換至「脊椎註解」標籤。
6. 若要選取標記偏好設定，請從「脊椎類型」清單選取脊椎區域。
7. 選取標記偏好設定。
8. 針對每個想要標記的脊椎重覆步驟 5 至 7。
9. 從「開始標籤」清單選取想要開始標記的脊椎的層級。
10. 決定要套用標籤的位置。
若要將標籤套用至所有相互關聯的序列，請選取「套用 3D 標籤」選項。

或


若只想將標籤套用至正在標記的影像而不套用至其他影像，請選取「僅套用標籤至正在標記的影像」選項。

11. 若要在標記時顯示圓周方塊高度與角度的預設行，請選取「標記時顯示行」核取方塊。
12. 若要設定相對於預設脊椎大小的脊椎大小百分比，請選取百分比。
13. 若要儲存設定並關閉對話方塊，請按一下「確定」。
14. 若要儲存變更並關閉「自訂」對話方塊，請按一下「確定」。

設定以作業階段為基礎的標記偏好設定



1. 從「影像」區域的內文或頂端工具列中按一下「脊椎註解」。
- 或
若是使用內文工具列的文字選單 (Ctrl + 按一下滑鼠右鍵)，請選取「標示」>「脊椎註解」。
2. 在「脊椎註解」對話方塊中，從「目前標籤」清單選取想要開始進行標記的脊椎層級。
3. 若要從最差的脊椎標記到最佳的脊椎，請選取「從最差到最佳標記」核取方塊。
- 或
若要從最佳的脊椎標記到最差的脊椎，請清除「從最差到最佳標記」核取方塊。
4. 若只要標記脊椎，請選取「標記脊椎」核取方塊。
5. 若只要標記圓盤，請選取「標記圓盤」核取方塊。
6. 若要在標記時顯示圓周方塊高度與角度的預設行，請選取「標記時顯示行」核取方塊。
7. 若需以其他脊椎骨輔助脊椎標記，請選取「包含 C8」及/或「包含 L6」核取方塊。

套用脊椎標籤



1. 顯示 CT、MR 或包含矢狀影像的其他脊椎檢查。
2. 按一下要標記的矢狀 (或可能是冠狀) 影像。
3. 從「影像」區域的內文或頂端工具列中按一下「脊椎註解」。
- 或
若是使用內文工具列的文字選單 (Ctrl + 按一下滑鼠右鍵)，請選取「標示」>「脊椎註解」。
4. 在「脊椎註解」對話方塊中，視需要變更任何以作業階段為基礎的偏好設定。
5. 若要套用標籤，請在正確的脊椎位置上按一下。
6. 套用標籤時，也可：

7. 放置好所有標籤後，按一下滑鼠右鍵或按一下「關閉」關閉「脊椎註解」對話方塊。
8. 必要時，儲存脊椎標籤。



重新定位脊椎標籤

1. 從「影像」區域的內文或頂端工具列中按一下「脊椎註解」。
- 或
若是使用內文工具列的文字選單 (Ctrl + 按一下滑鼠右鍵)，請選取「標示」>「脊椎註解」。
2. 在「脊椎註解」對話方塊中，按一下「移動標籤」。
3. 選取標籤 (例如 L5) 並用滑鼠將之移動至所需的水平位置。


變更脊椎標籤圓周方塊的大小




1. 若啟用「脊椎註解」對話方塊中的「變更角度」開關，請按一下該開關，以啟用「變更大小」開關。
2. 捲動滑鼠滾輪來調整方塊的大小。

變更脊椎標籤圓周方塊的角度







1. 若啟用「脊椎註解」對話方塊中的「變更角度」開關，請按一下該開關，以啟用「變更大小」開關。
2. 滾動滑鼠來調整方塊角度。

刪除脊椎標籤

1. 從「影像」區域的內文或頂端工具列中按一下「脊椎註解」。
- 或
若是使用內文工具列的文字選單 (Ctrl + 按一下滑鼠右鍵)，請選取「標示」>「脊椎註解」。
2. 若要刪除 3D 層級的標籤：

- a. 在「脊椎註解」對話方塊中，按一下「清除標籤」。 
 - b. 按一下標籤後，系統隨即將方塊放置在標籤上。
 - c. 按一下欲刪除的標籤。
 - d. 視需要重覆步驟 c。
 - e. 若要停用刪除模式，請按一下「清除標籤」。 
3. 若要刪除所有層級的所有標籤，請按一下「脊椎註解」對話方塊中的「刪除所有標籤」。 

常用脊椎標記工具

按鈕	名稱	使用
	變更角度	調整脊椎標籤圓周方塊的角度
	變更大小	調整脊椎標籤圓周方塊的大小
	清除標籤	刪除所選脊椎標籤
	清除全部標籤	刪除所有脊椎標籤
	移動標籤	將所選脊椎標籤移動至另一個位置
	脊椎註解	將脊椎標記套用至軸向 CR、CT 或 MR 影像，以指出影像與脊椎的哪一個區段相交